



**ResMed** | Healthcare

## ResMed Spezial-Reinigungsspray

- schonende und zugleich gründliche Reinigung von Atemtherapie-Masken und -Schläuchen
- gebrauchsfertige Sprühlösung
- für die tägliche Anwendung geeignet
- biologisch abbaubar



**ResMed Spezialreinigungs-Spray, 100 ml**

Art.-Nr. 7072480

**ResMed Spezialreinigungs-Spray, 400 ml**

Art.-Nr. 7072479

## ResMed Reinigungstücher

- natürliches Reinigungstuch aus Baumwolle
- mit Aloe Vera und anderen Pflanzenextrakten
- parfümfrei, alkohol- und latexfrei
- Tücher sind perforiert und einfach entnehmbar
- 14 einzeln verpackte Tücher ideal für die Reise



**ResMed Reinigungstücher**

**62 Stück (Spenderbox)**

Art.-Nr. 61918

**ResMed Reinigungstücher**

**14 einzeln verpackte Tücher**

Art.-Nr. 61919

Auch online erhältlich unter **ResMedShop.de**

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16 · 82152 Martinsried · Deutschland



**ResMed** | Healthcare



# Reinigung & Pflege

## Tipps für Maske und Zubehör

© 2017 ResMed GmbH & Co. KG · Art.-Nr. 1017411 · 10 · 07 17

ResMed-Healthcare.de



Die Reinigung & Pflege beeinflusst die Funktionsfähigkeit, den Komfort und die Lebensdauer Ihres Maskensystems.

## Achtung!

- **Keine** aromatischen Lösungen oder Duftöle, Bleichmittel, Alkohol oder stark riechende Produkte verwenden.
- **Keine** rückfettenden Reinigungsmittel verwenden.
- Die Teile **nicht im Geschirrspüler** reinigen und **nicht bei direkter Sonneneinstrahlung** oder **auf der Heizung** trocknen, dies könnte zu Beschädigungen führen.



## Tipps

- Die Maskenreinigung sollte zu einem täglichen Ritual werden – wie das Zähneputzen.
- Am besten die Maske morgens reinigen, damit am Abend wieder alle Teile trocken sind. Restfeuchtigkeit zwischen den beiden Membranen des Maskenkissens kann bei Bedarf mit einem Wattestäbchen entfernt werden.
- Vor dem erstmaligen Gebrauch die komplette Maske mit klarem Wasser spülen und abtrocknen.



# Reinigung

Täglich/nach jedem Gebrauch:

**Maske entsprechend der beiliegenden Anleitung zerlegen.**

- Für eine optimale Abdichtung der Maske muss Hautfeuchtigkeit und -fett nach jedem Gebrauch vom Maskenkissen entfernt werden.
- Die Maskenteile (ohne Kopfband) mit Spezial-Reinigungsspray/-tüchern von ResMed oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und neutralem Reinigungsmittel (z. B. Flüssigseife) reinigen.
- Luftauslassöffnungen mit einer weichen Bürste reinigen.
- Alle Teile unter fließendem Wasser gründlich abspülen und an der Luft trocknen lassen.
- Die vollständig getrockneten Teile entsprechend der Anweisung wieder zusammenbauen.
- Den Atemschlauch am Griffprofil der Manschette vom Gerät abziehen und bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen, trockenen Ort aufhängen (z. B. hängend über der Duschwand).



## Wöchentlich

- Das **Kopfband** nur per Hand waschen. **Nicht bügeln!** Wenn das Kopfband neu ist, kann es während der ersten Wäsche zu Farbauswaschungen kommen.
- Den Atemschlauch mit dem Spezial-Reinigungsspray von ResMed Healthcare (gemäß Anleitung) oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und einem milden Reinigungsmittel reinigen, gut abspülen und hängend trocknen lassen (z. B. hängend über der Duschwand).



## Monatlich

- Das Gehäuse des Atemtherapiegerätes mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Den **Luftfilter** überprüfen und bei Bedarf gemäß der Anleitung auswechseln. Der Luftfilter ist **nicht waschbar!**

