



AirSense™ 10 / AirCurve™ 10 / AirStart™ 10 Geräteserien

Anleitung zum Ablesen der Betriebsstunden




Zu Geräten der AirSense 10 / AirCurve 10 / AirStart 10 Geräteserien gehören:

AirSense 10 AutoSet, AirSense 10 AutoSet for Her, AirSense 10 Elite,
AirCurve 10 S, AirCurve 10 VAuto, AirCurve 10 ST, AirCurve 10 CS Pacewave,
AirCurve 10 CS-A Pacewave, AirStart 10 APAP und AirStart 10 CPAP

1

Schalten Sie Ihr Atemtherapiegerät wie gewohnt ein.
Warten Sie, bis in der obersten Zeile die Meldung
STARTSEITE erscheint.

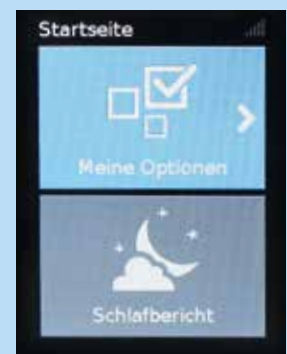

2

Drehen Sie den Bedienregler bis das Feld SCHLAFBERICHT
blau oder rosa hinterlegt ist und bestätigen Sie die Auswahl
durch Drücken auf den Bedienregler.

Der unter „Gesamtnutzg“ dargestellte Wert zeigt die
Betriebsstunden an. Ggf. müssen Sie für die Darstellung
mit dem Bedienregler nach unten fahren.



3

Um zur Startseite zurückzukehren, wählen Sie entweder den
Schriftzug STARTSEITE mit dem Bedienregler aus und bestätigen
durch Druck auf den Regler. Wenn der Schriftzug blau oder rosa
hinterlegt ist oder Sie drücken auf dem Home-Knopf
(Häuschenknopf).

