

Alle unsere Reinigungs- und Hygieneartikel finden Sie auch **bequem in unserem Onlineshop** – einfach QR-Code scannen!



Resmed Reinigungstücher

62 Stück (Spenderbox): Art.-Nr. 61918
14 Stück einzeln verpackt: Art.-Nr. 61919

- Natürliches Reinigungstuch aus Baumwolle
- Parfümfrei, alkohol- und latexfrei
- Einzeln verpackte Tücher ideal für die Reise



WILAsil-Spezialreiniger

WILAsil-Spezialreiniger, 250 ml
Art.-Nr. 7079868

- Geeignet für Masken, Atemschläuche und weiteres CPAP-Zubehör
- Hygienische und materialschonende Reinigung
- Ergiebige Dosierung (2 ml Reinigungskonzentrat auf 1l Wasser)
- Angenehmer Zitrusduft



Spezialreinigungsbürste

Spezialreinigungsbürste für SlimLine-Schlauch
15 mm: Art.-Nr. 7079478
19 mm: Art.-Nr. 7079477

- Für eine gründliche Reinigung Ihres CPAP-Schlauchs



Vertrieb durch:

Resmed GmbH & Co. KG, Mahatma-Gandhi-Platz 3, 81248 München
 Tel. 089 9901-0, Fax 089 9901-1055, E-Mail kontakt@resmed.de

© 2025 Resmed GmbH & Co. KG, Art.-Nr. 1017411/13, Obj.-ID. C147611 · 13 · 12 25
 Zur Erstellung und Bearbeitung von Bildern und Grafiken werden teilweise KI-basierte Tools eingesetzt. Abbildungen dienen der Illustration und können von realen Personen, Produkten oder Situationen abweichen.



Reinigung & Pflege

Tipps für Maske und Zubehör



Die Reinigung & Pflege beeinflusst die Funktionsfähigkeit, den Komfort und die Lebensdauer Ihres Maskensystems.

Achtung!

- Keine aromatischen Lösungen oder Duftöle, Bleichmittel, Alkohol oder stark riechende Produkte verwenden.
- Keine rückfettenden Reinigungsmittel verwenden.
- Die Teile nicht im Geschirrspüler reinigen und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf der Heizung trocknen, dies könnte zu Beschädigungen führen.

Tipps

- Die Maskenreinigung sollte zu einem täglichen Ritual werden – wie das Zähneputzen.
- Am besten die Maske morgens reinigen, damit am Abend wieder alle Teile trocken sind. Bitte auf Restfeuchtigkeit achten und ggf. mit einem Wattestäbchen final trocknen.
- Vor dem erstmaligen Gebrauch die komplette Maske mit klarem Wasser spülen und abtrocknen.
- Wechseln Sie Ihre Maske und das Zubehör in regelmäßigen Abständen aus. Es wird empfohlen, die Maske nach 12 Monaten zu ersetzen

Reinigungsroutine

Täglich / nach jedem Gebrauch:

Maske entsprechend der beiliegenden Anleitung zerlegen.

- Für eine optimale Abdichtung der Maske muss Hautfeuchtigkeit und -fett nach jedem Gebrauch vom Maskenkissen entfernt werden.
- Die Maskenteile (ohne Kopfband) mit Spezialreiniger oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und neutralem Reinigungsmittel (z. B. Flüssigseife) reinigen.
- Luftausöffnungen und Kniestück mit einer weichen Bürste reinigen.
- Alle Teile unter fließendem Wasser gründlich abspülen und an der Luft trocknen lassen.
- Die vollständig getrockneten Teile entsprechend der Anweisung wieder zusammenbauen.
- Den Atemschlauch am Griffprofil der Manschette vom Gerät abziehen und bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen, trockenen Ort aufhängen (z. B. hängend über der Duschwand).

Wöchentlich

- Das Kopfband nur per Hand waschen. **Nicht bügeln!** Wenn das Kopfband neu ist, kann es während der ersten Wäsche zu Farbauswaschungen kommen.
- Den Atemschlauch mit dem Spezialreiniger (gemäß Anleitung) oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und einem milden Reinigungsmittel reinigen, ggf. Reinigungsbürste verwenden, gut abspülen und hängend trocknen lassen (z. B. hängend über der Duschwand).

Monatlich

- Das Gehäuse des Atemtherapiegerätes mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Den Luftfilter überprüfen und bei Bedarf gemäß der Anleitung auswechseln. Der Luftfilter ist nicht waschbar!